




使用步驟說明：

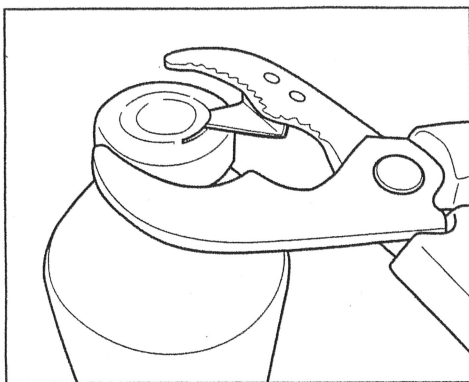

步驟一、
一手握住開瓶器，另一手握住藥劑瓶。

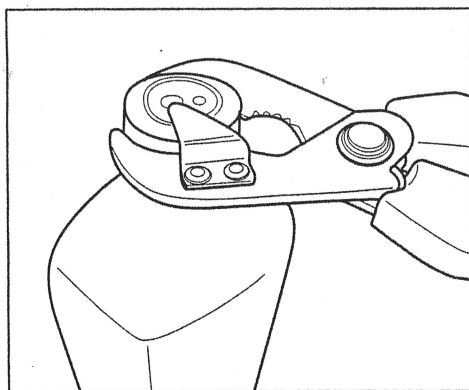

步驟二、
將凸片傾斜地插入瓶蓋上方的鋁質密封墊，然後手柄往上翻將密封墊移除。

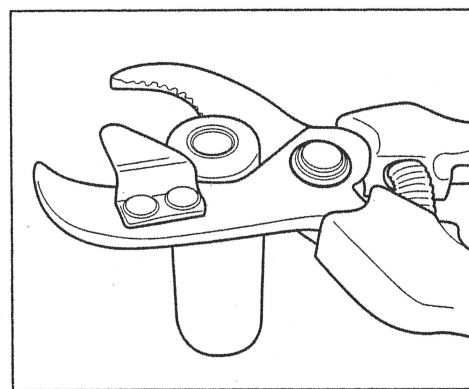

步驟三、
利用開瓶器銳利的C型夾並夾在瓶蓋中央位置的高度，然後手柄往外翻將瓶蓋移除。

提示：
開瓶器 C 型夾 (大)：
適用瓶蓋外徑 21mm-38mm
開瓶器 C 型夾 (小)：
適用瓶蓋外徑 18mm-26mm

* 萬一藥水瓶遭到藥劑污染，請用 75%的酒精清潔和消毒。

警語：

1. 此開瓶器是專門給醫療和實驗室人員開啓藥劑瓶使用。
2. 請勿讓身體直接觸碰銳利的 C 型夾。
3. 請勿不正當使用，造成開瓶器 C 型夾成彎曲狀。
4. 傳遞開瓶器時，請把手柄端傳給使用者以確保安全。
5. 使用開瓶器時，請注意周遭的人和物品。
6. 開瓶器使用完畢後，請存放在櫃子裡。
7. 使用開瓶器前，請先詳閱操作指示。
8. 請勿將開瓶器使用在已損壞的藥劑瓶上。
9. 請勿私自拆解開瓶器。

廢棄物處理：

當要拋棄開瓶器時，請依據當地廢棄物處理規定處置之。



fortune
medical

製造廠名稱 富強醫材股份有限公司
製造廠地址 桃園縣中壢市長春二路 256 號
藥商名稱 富強醫材股份有限公司
藥商地址 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話 886-2-2624-2233 傳真 886-2-2624-2266

多功能 - 藥瓶 開瓶器

使用目的：作為不同大小之藥劑瓶蓋開啓工具。

產品特性：

1. 特殊凸片設計可以準確並快速的將藥劑瓶上方的鋁質密封墊移除。
2. 獨特雙 C 型夾設計可夾住不同尺寸的瓶蓋。
3. 使用安全、操作容易。
4. 手把防滑設計。
5. 安全鎖功能。