



“富強”矽質手術量測尺  
衛部醫器製壹字第 006137 號



### 預期用途:

富強矽質手術量測尺可於手術時約略評估器官與組織的圓周或長度

### 特色:

1. 100%醫療級矽膠具良好生物相容性
2. 量測尺顯示 2-12 公分，刻度間距為 0.5 公分
3. 材質柔和，舒適性佳
4. 可彈性調整
5. 滅菌
6. 單次使用
7. 不含乳膠

### 使用步驟:

1. 將矽質量測尺置於欲量測的部位旁
2. 選擇要量測長度或圓周長
3. 若測量長度，將量測尺平放於器官或組織旁
4. 若測量圓周長，則將量測尺環繞器官或組織一圈
5. 需緊貼且不壓迫器官或組織

### 規格:

種類編號	尺寸	描述
1860-7510	寬度: 20.5 mm 長度: 200 mm	刻度顯示 2cm 到 12cm，間距為 0.5cm

### 注意:

1. 矽質手術量測尺僅供參考，醫生應依據專業判斷測量尺寸大小

### 處理:

依當地醫療器材廢棄物規定進行處理

### 儲存:

保存於陰涼乾燥處

### 滅菌:

1. 富強矽質手術量測尺採無菌包裝，單次使用之器材
2. 產品以環氧乙烷滅菌，滅菌方式標示於標籤中
3. 使用期限標示於包裝袋上
4. 不可重覆滅菌或重覆使用
5. 包裝破損時請勿使用



製造業者名稱: 富強醫材股份有限公司

製造業者地址: 320 桃園市中壢區長春二路 256 號

醫療器材商名稱: 富強醫材股份有限公司

醫療器材商地址: 251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話: 886-2-2624-2233 傳真: 886-2-2624-2266