



**fortune
medical**

“富強”導尿管

“Fortune” Urological Catheter

使用說明書

衛署醫器製字第 001028 號

導尿管:矽質血尿管

適用於：

富強矽質血尿管適用於前列腺切除術患者膀胱中尿液的排出。

特色：

- ◆管身透明，具 X 光顯影線，可藉 X-ray 的使用來察覺插管位置。
- ◆氣囊柔軟具適應性，使用時可順應膀胱構造而服貼。
- ◆管身圓型平滑，氣囊完整服貼可有效降低插管及拔管時可能造成的傷害。
- ◆共有五種型式：
 1. A 型:三叉，直式圓頭型

3-WAY						
一般	編號	尺寸	引流腔	氣囊容量	管身長	X-RAY
氣囊	1861-0318	18FR	3	50-80 cc	420 mm	有
	1861-0320	20 FR				
	1861-0322	22 FR		80-100cc		
	1861-0324	24 FR				

2. B 型:三叉，直式口嘴型

3-WAY						
一般	編號	尺寸	引流腔	氣囊容量	管身長	X-RAY
氣囊	1862-0318	18 FR	3	50-80cc	420 mm	有
	1862-0320	20 FR				
	1862-0322	22 FR		80-100cc		
	1862-0324	24 FR				

3. C 型:三叉，彎式圓頭型

3-WAY						
一般	編號	尺寸	引流腔	氣囊容量	管身長	X-RAY
氣囊	1863-0318	18 FR	3	50-80cc	420 mm	有
	1863-0320	20 FR				
	1863-0322	22 FR		80-100cc		
	1863-0324	24 FR				

4. D 型:三叉，彎式口嘴型

2-WAY						
一般	編號	尺寸	引流腔	氣囊容量	管身長	X-RAY
氣囊	1864-0218	18 FR	2	50-80cc	420 mm	有
	1864-0220	20 FR				
	1864-0222	22 FR		80-100cc		
	1864-0224	24 FR				

3-WAY						
一般	編號	尺寸	引流腔	氣囊容量	管身長	X-RAY
氣囊	1864-0318	18 FR	3	50-80cc	420 mm	有
	1864-0320	20 FR				
	1864-0322	22 FR		80-100cc		
	1864-0324	24 FR				

5. E 型:三叉，削口型

3-WAY						
一般	編號	尺寸	引流腔	氣囊容量	管身長	X-RAY
氣囊	1865-0318	18 FR	3	50-80cc	420 mm	有
	1865-0320	20 FR				
	1865-0322	22 FR		80-100cc		
	1865-0324	24 FR				

- ◆無菌包裝。

使用前測試：

為了測試球體是否洩漏，請先測試球體功能正常，確認球體功能後，植入前須移除球體內液體。

使用程序：

1. 前列腺切除術後通常會出現血尿。
2. Frank bleeding 被認為是嚴重的緊急情況和潛在的併發症，手術後會持續數天。
3. 請注意尿液的顏色和是否存在凝塊，因為凝塊會阻塞導管並導致痙攣、疼痛和進一步出血。
4. 因此，導管應始終保持暢通。
5. 請檢查膀胱是否充盈度和壓痛。
6. 有使用血尿導管的患者，即使通過導尿管保持膀胱排空，也有膀胱充盈的感覺。如果患者試圖排尿，則會刺激膀胱粘膜。
7. 液體攝入有助於減少膀胱粘膜刺激。
8. 過度刺激可能會導致進一步出血和頻繁和不舒服的膀胱痙攣。
9. 護士應遵照醫生的指示，何時沖洗、使用何種溶液、使用多少溶液。
10. 灌溉通常保持在最低限度，僅在必要時使用。
11. 如果拔除導管，應記錄數天每次排尿的時間和量。
12. 如果排尿功能不理想，應重新插入導尿管。
13. 導管移除通常很簡單。將空注射器連接到充氣閥，並取出注入的水量。輕輕收回導管。

禁忌症：

1. 尿道受傷或狹窄。
2. 近期內有進行尿道或膀胱手術。
3. 經由尿道切除前列腺造成大面積結痂。
4. 有明顯的尿道阻塞症狀。
5. 經會陰部直腸腫瘤切除術、直腸狹窄或相似的直腸病理症狀。

警告：

1. 不可使用具石油成分的潤滑油。
2. 用無菌蒸餾水注入氣囊使其保持膨脹。不建議使用任何其他液體、空氣、二氧化碳來注入氣囊。
3. 注入時注意速度需緩慢、注入量依容量標示。
4. 萬一氣囊灌注量無法抽除，要檢查注射筒及灌注腔是否鎖緊卡到底，若仍不能抽除，請洽醫師協助。
5. 不可使用尖銳的器具操作，避免損壞導尿管結構，使產品失去功能。
6. 使用期間應多喝水，避免感染，尿路阻塞及尿液結晶。

7. 使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。每個病人情況不一樣，仍須遵照醫事人員的指示。
8. 使用無針注射筒注入球體。建議每日檢查氣囊液量避免滑出，並再次注入適當容量以避免球體破裂。
9. 嚴格遵守無菌手法及維持手部清潔可降低泌尿導尿管有關的尿道感染風險。

不良反應：

1. 尿道、腎臟或血液的細菌感染。
2. 尿道傷害。
3. 皮膚磨損。
4. 膀胱結石。
5. 出血。

廢棄物處理：

此產品使用後，請依照醫療機構準則或應依照該國對此類產品的相關規定予以處理。

儲存：

保存於陰涼乾燥處。

滅菌資訊：

1. 富強矽質雙(三)叉導尿管採無菌包裝，一次使用用完即丟之設計。
2. 以環氧乙烷(EO)滅菌，滅菌方式標示於標籤中。
3. 保存期限標示於包裝袋上。
4. 不可重覆滅菌。
5. 包裝破損時請勿使用。



fortune
medical

製造業者名稱：富強醫材股份有限公司

製造業者地址：320 桃園市中壢區長春二路 256 號

醫療器材商名稱：富強醫材股份有限公司

醫療器材商地址：251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：886-2-2624-2233 傳真：886-2-2624-2266