



“富強”矽質恥骨導尿管 “Fortune” Silicone Supra-pubic Catheter

使用說明書

衛署醫器製字第 001067 號

用途

富強矽質恥骨導尿管經恥骨上穿刺插入膀胱，幫助膀胱中尿液的排出。

特色

1. 管身透明，具 X 光顯影線，可藉 X-ray 的使用來察覺插管位置。
2. 柔軟且充氣平均的氣囊，在使用時可順應膀胱構造而服貼。
3. 管身圓型平滑，氣囊完整服貼可有效降低插管及拔管時可能造成的傷害。
4. 中空探針藉由穿刺，可協助導尿管立即插入膀胱。輕折探針兩翼即可輕鬆移除。
5. 導線方便導尿管的替換。

禁忌症

- 膀胱攣縮(Contracted bladder)
- 顯微血尿(Microhaematuria)
- 凝血機能異常(Coagulopathies)
- 下腹部有腫瘤(Tumours of the lower abdomen)
- 懷孕 (Pregnancy)
- 下腹最近有手術傷口(Recent surgical scars on the lower abdomen)
- 在穿刺處皮膚有嚴重的變化(Severe skin changes in the area to be punctured)
- 膀胱或前列腺最近有手術情形(Recent surgery to the bladder or prostate)

規格

矽質恥骨導尿管 (Silicone Supra-pubic Catheter):附導管塞

標準氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	管徑	氣囊容量	管身長度
1890-0212	4890-0212	12 FR	5-10 cc	420 mm
1890-0214	4890-0214	14 FR		
1890-0216	4890-0216	16 FR		
1890-0218	4890-0218	18 FR		
1890-0220	4890-0220	20 FR		
1890-0222	4890-0222	22 FR		
1890-0224	4890-0224	24 FR	5-10 cc	500 mm
1857-0212	--	12 FR		
1857-0214	--	14 FR		
1857-0216	--	16 FR		

* 1857: J 型豬尾巴

矽質恥骨導尿管穿刺組(Silicone Supra-Pubic Catheter Puncture Set):一體成型氣囊、中空探針、導管塞、導管夾

產品編號	管徑	氣囊容量	管身長度
4890-9212	12 FR	5-10 cc	420 mm
4890-9214	14 FR		

*導管塞：用於堵住導尿管的塑膠塞子。

矽質恥骨導尿管替換組(Silicone Supra-Pubic Catheter Exchange Set):導管、導管夾、導線、導管塞

標準氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	管徑	氣囊容量	管身長度
1890-8212	4890-8212	12 FR	5-10 cc	420 mm
1890-8214	4890-8214	14 FR		
1890-8216	4890-8216	16 FR		
1890-8218	4890-8218	18 FR		
1890-8220	4890-8220	20 FR		
1890-8222	4890-8222	22 FR		
1890-8224	4890-8224	24 FR	5-10 cc	500 mm
1857-8212	--	12 FR		
1857-8214	--	14 FR		
1857-8216	--	16 FR		

* 1857: J 型豬尾巴

操作程序

穿刺 Puncture :

1. 扣診膀胱，確認膀胱已脹滿水。
2. 組裝並備妥所需器材: 導管、無菌手套、清潔用物、注射針、引流容器。
3. 排除所有的禁忌症。在恥骨聯合中線上 2-3 公分處，剃除毛髮並消毒穿刺處。必要時，可在該處施予麻醉。
4. 將導管連接於尿液引流系統，並將導管置入分離式中空穿刺針，確認導管上第一標記處剛好齊於穿刺針雙翼處。
5. 切開皮膚。
6. 持穿刺針的手垂直入針。
7. 導管上可見尿液流出表示穿刺位置正確。檢視尿液，若無法輕易回流，表示導管擺放位置太淺。
8. 平穩地將導管繼續推入膀胱直到第二個標記處。
9. 球體依所標示的容量，以無菌水充滿固定。
10. 輕折分離式穿刺針雙翼，慢慢移動拉出體外。
11. 以膠帶黏貼固定導管。

換管 Exchanging catheter :

1. 確認膀胱已適度充滿水，並將新的導管備妥。
2. 將導引線沿著舊管放入，直到膀胱適當位置。
3. 在舊管灌注球體端接上空針，將球體內既存的液體抽出直到無法抽出任何液體為止。
4. 沿著先前置入的導引線，緩慢拉出舊管後，再將新的導管順著導引線路徑放入。
5. 球體依所標示的容量，以無菌水充滿固定。
6. 移除導引線，直接黏貼膠帶，固定導管。

註: 穿刺用的導管建議使用一體成型氣囊導管，換管則不限用一體成型氣囊導管，標準氣囊導管亦可使用。

警告

1. 不應在身體中線的側面進行穿刺。
2. 不可在中空探針內抽管，避免導管管端分裂或氣囊破損。
3. 換管時，應先行使用導線導引至膀胱。

4. 以膠帶固定導管。勿直接縫合導管來固定，避免管身受損。
5. 必須定期檢視導管情形。

注意事項

1. 遵循無菌插管技術。使用時，用不含針的注射筒將無菌水由灌注腔頭注入氣囊使其保持膨脹。
2. 注入時注意速度需緩慢、注入量依容量標示。
3. 萬一氣囊灌注量無法抽除，請勿將靠近灌注腔頭的灌注腔切斷。若始終無法移除，請諮詢泌尿科醫師。

儲存

保存於陰涼乾燥處。

滅菌資訊

1. 富強 矽質恥骨導管採無菌包裝，一次使用用完即丟之設計。以環氧乙烷(E0)滅菌，滅菌方式標示於標籤中。
2. 保存期限標示於包裝袋上。
3. 不可重覆滅菌或重覆使用。重覆使用會有發炎反應或細菌感染的風險。
4. 包裝破損時請勿使用。



fortune
medical

製造業者名稱: 富強醫材股份有限公司

製造業者地址: 320 桃園市中壢區長春二路 256 號

醫療器材商名稱: 富強醫材股份有限公司

醫療器材商地址: 251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話: 886-2-2624-2233 傳真: 886-2-2624-2266