

分離式(兩截)鼻胃管 量測法

1. 使用過的消費者選擇方式：可參考原先放置之長度直接選擇現有產品的長度與規格。
2. 未曾使用過的消費者選擇方式：先測量鼻尖至耳垂再至劍突的長度再加 10 公分後之總長度，據此選擇現有產品的長度與規格。

根據 1 或 2 的長度，挑選現有 5 種長度規格之其中一種，(1)55 公分 (2)60 公分 (3)65 公分 (4)70 公分 (5)75 公分，如長度剛好無法符合現有產品的長度標準，則挑選較長且接近的長度規格，例如需求 49 公分長度則選擇 55 公分、需求 58 公分長度則選擇 60 公分、需求 64 公分長度則選擇 65 公分。

*簡易長度規格對照表

產品規格	55 公分	60 公分	65 公分	70 公分	75 公分
根據 1 或 2 量測的長度	45~55 公分	56~60 公分	61~65 公分	66~70 公分	71~75 公分

因胃部的平均深度約 25 公分左右，長度少於 45 公分以下，長於 75 公分以上則不適用本產品。

3. 選擇通用長度的參考數據為 60 公分 > 55 公分 > 65 公分 > 70 公分 > 75 公分

型號	規格、置入端長度
2020-5514	14Fr、管長 55cm
2020-5516	16Fr、管長 55cm
2020-6014	14Fr、管長 60cm
2020-6016	16Fr、管長 60cm
2020-6514	14Fr、管長 65cm
2020-6516	16Fr、管長 65cm
2020-7014	14Fr、管長 70cm
2020-7016	16Fr、管長 70cm
2020-7514	14Fr、管長 75cm
2020-7516	16Fr、管長 75cm